


ТЕРМОМЕТР МЕДИЧНИЙ ЦИФРОВИЙ «ВОЛЕС» ЕСТ-1

Інструкція із використання

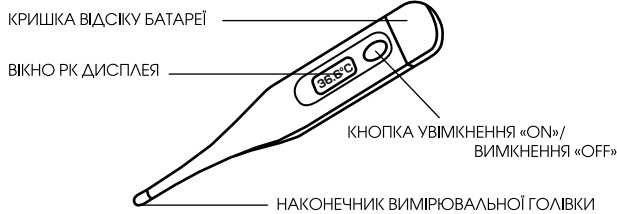

UA.TR.098



ІНСТРУКЦІЯ ПО ДОГЛЯДУ

До та **Після** кожного використання очистіть термометр м'якою тканиною змоченою ізопропіловим спиртом, розведеним водою, або промийте ХОЛОДНОЮ мильною водою. Пристрій можна занурювати у воду або спирт (лише водонепроникний моделі). Не замочуйте протягом тривалого періоду часу та не стерилізуйте методом кип'ятіння, газовими або паровими автоклавами.

ЯК ВИМІРЯТИ ТЕМПЕРАТУРУ

- 1) Натисніть кнопку **ON/OFF** щоб увімкнути пристрій. Пристрій подасть звуковий сигнал і на екрані висвітлиться **1888** $\frac{^{\circ}\text{C}}{^{\circ}\text{F}}$. Ця перевірка РК-дисплея триватиме приблизно 2 секунди.
- 2) Потім відобразиться температура, виміряна минулого разу, разом із позначкою «**M**» у правому куті.
- 3) Коли відображається **Lo** та блимає $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$), термометр готовий до вимірювання температури. Але якщо температура в приміщенні вище $32,0^{\circ}\text{C}$, температура приміщення відобразиться замість **Lo**.
- 4) По завершенні вимірювання температури пролунає звуковий сигнал.
- 5) Натисніть кнопку **ON / OFF** щоб вимкнути пристрій. (Пристрій автоматично вимкнеться приблизно через десять хвилин після використання.)

ОРАЛЬНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА (В РОТІ)

Щоб показання були максимально точними, поставте наконечник термометра ліворуч або праворуч від кореня язика. Наконечник термометра повинен контактувати з поверхнею язика під час вимірювання і розміщуватись під язиком.

- Під час вимірювання тримайте рот закритим і дихайте рівномірно носом.
- Не їжте і не пийте нічого перед вимірюванням.
- Приблизний час вимірювання: 40 секунд.

Порада: Закрийте рот принаймні за 2 хвилини до вимірювання температури для більш точного вимірювання.

РЕКТАЛЬНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА (В ЗАДНЬОМУ ПРОХОДІ)

Нанесіть водорозчинну змазку на наконечник. Аккуратно вставте наконечник на 2-3 см в пряму кишку. Приблизний час вимірювання: 40 секунд

Примітка: Ректальна температура в цілому на $0,5^{\circ}\text{C}/1,0^{\circ}\text{F}$ вища, ніж оральна.

АКСИЛЯРНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА (ПІД ПАХВОЮ)

Витріть пахву сухим рушником і покладіть наконечник під пахву, щоб кінчик торкався шкіри, а термометр знаходився перпендикулярно до тулуба. Розташуйте руку на грудях, щоб наконечник був добре закритий рукою. Приблизний час вимірювання: 1 хвилина.

Примітка: Аксилярна температура, як правило, на $0,5^{\circ}\text{C}/1,0^{\circ}\text{F}$ нижча, ніж оральна. **Порада:** Притисніть руку до тулуба принаймні за 5 хвилин до вимірювання температури для більш точного вимірювання.

ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД


- Вимірювати температуру у дітей слід лише під наглядом дорослих.
- Не ходіть, не бігайте і не розмовляйте під час вимірювання.
- Зберігайте пристрій у захисному футлярі, коли він не використовується.
- Не зберігайте пристрій під впливом прямих сонячних променів, пилу або вологи.
- Уникайте екстремальних температур.
- Слід уникати падіння або сильних ударів термометра.
- Не намагайтеся розібрати термометр, окрім випадків заміни батареї.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ

Батарею цифрового термометра потрібно замінити, коли у нижньому правому куті РК дисплея з'являється \square . Замініть на нову батарею LR41 1,5V або еквівалентну.

Щоб замінити батарею:

- Зніміть кришку батареї з термометра.
- Зніміть тримач батареї.
- Використовуйте неметалевий загострений інструмент, щоб виїняти батарею.
- Вийміть батарею та вставте нову стороною (+) догори.
- Обережно надіньте кришку батареї на місце.

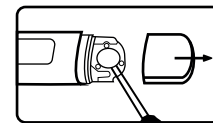

Примітка: Тримайте батарею подалі від дітей та джерел тепла.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Діапазон вимірювання	$32,0^{\circ}\text{C}$ ($89,6^{\circ}\text{F}$) ~ $42,9^{\circ}\text{C}$ ($109,2^{\circ}\text{F}$)
Показник низької $^{\circ}\text{C}$	$< 32,0^{\circ}\text{C}$ ($89,6^{\circ}\text{F}$), показник: $\text{Lo}^{\circ}\text{C}$ ($\text{Lo}^{\circ}\text{F}$)
Показник високої $^{\circ}\text{C}$	$\geq 43,0^{\circ}\text{C}$ ($109,4^{\circ}\text{F}$), показник: $\text{Hi}^{\circ}\text{C}$ ($\text{Hi}^{\circ}\text{F}$)
Визначення дисплея	$0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$)
Точність вимірювання	$35,0^{\circ}\text{C}$ ($95,0^{\circ}\text{F}$) ~ $39,0^{\circ}\text{C}$ ($102,2^{\circ}\text{F}$) $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,2^{\circ}\text{F}$) інший діапазон: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($0,4^{\circ}\text{F}$)
Сигнал при гарячці $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ ($100,0^{\circ}\text{F}$)	30 коротких звукових сигналів за 10 секунд
Звичайний сигнал $< 37,8^{\circ}\text{C}$ ($100,0^{\circ}\text{F}$)	10 довгих звукових сигналів за 10 секунд
Автоматичне вимкнення	8 хвилин \pm 2 хвилини
Батарея	LR41, 1,5 V
Термін служби батареї	200 годин безперервної роботи
Умови експлуатації	Температура: 10°C ~ 35°C ($50,0^{\circ}\text{F}$ до $95,0^{\circ}\text{F}$) Вологість: 30%~ 35% RH
Умови зберігання	Температура: -10°C ~ 60°C ($14,0^{\circ}\text{F}$ до $140,0^{\circ}\text{F}$) Вологість: 25%~ 90% RH

Середнє напрацювання на відмову, год: 10000

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців від дати продажу у роздрібній мережі.

Виробник: NINGBO HI-LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Qiaoli Village, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315191, P.R.China

NINGBO ХАЙ-ЛАЙФ МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Цяолі Віллідж, Цзяньшань Таун, Іньчжоу Дістрікт, Нінбо Сіті, Чжецзян Провінс, 315191, Китайська Народна Республіка

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД» 04210, Україна, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корп. 1

Тел.: +38 (044) 3000-504

email: sale@lamed.com.ua

www.lamed.com.ua



Дата випуску: 20.10.2020