

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ  
**Термометр медичний безртутний торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити цілісність колби і капілярної трубки всередині колби медичного виробу.
2. Використовувати для вимірювання температури у пахві, ротовій порожнині та анальному отворі.
3. Перед використанням стовпчик рідини потрібно струсити нижче найменшої позначки вимірювальної шкали.
4. При розриві рідини в капілярній трубці струсити до з'єднання рідини.
5. Очистити та продезінфікувати термометр спиртом медичним.
6. Обережно розмістити термометр у місці вимірювання температури.
7. Міряти температуру протягом 5-7 min (хв).
8. Якщо термометр розбився – обережно зберіть уламки і змийте термометричну рідину щіткою або вологою ганчіркою з мильною піною. Розбитий термометр може бути утилізований разом із побутовими відходами.

<b>Назва модифікації медичного виробу українською мовою</b>
Термометр медичний безртутний торгової марки IGAR у футлярі зі звичайним ковпачком
Термометр медичний безртутний торгової марки IGAR у футлярі з ковпачком із ручкою для струшування




Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
[www.igar.ua](http://www.igar.ua), телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.**  
(Виробничі потужності) № 43, Xixin Road Zhangjing, Xibei Town Wuxi City 214194 Jiangsu China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753

Директор

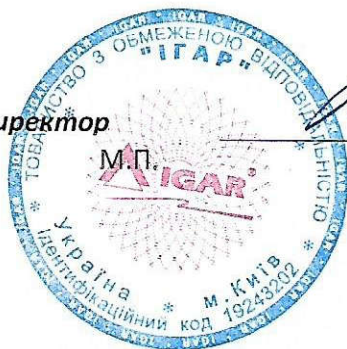

*(Signature)*  
**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування:  
14.08.2020 р. (Редакція 1).

Сторінка 1 з 1