

**Єкошик™** - это удобный и современный способ сбора биоматериала - кала. Подходит для всех видов исследований. Правильный сбор образца кала является обязательным условием для получения качественных результатов исследований.

#### **Характеристика:**

1. Тип: одноразовый набор.
2. Назначение: сбор биоматериала для медико-биологических исследований.
3. **Содержание упаковки:** емкость для сбора кала 20 мл, лопатка для сбора кала, бумажная корзина для анализа, перчатки одноразовые.

#### **Инструкция по применению:**

1. Для фиксации бумажной корзины: поднять сиденье унитаза, развернуть бумажную корзину и зафиксировать по краям унитаза с помощью наклеек.
2. Осуществить процесс дефекации (опорожнения прямой кишки).
3. Надеть одноразовые перчатки.
4. С емкости для сбора кала достать лопатку и набрать необходимое количество материала для анализа и поместить в емкость, закрыть крышкой.
5. Отлепить корзину с анализом от краев унитаза, смыть воду.
6. Снимите одноразовые перчатки, вымойте руки.

**ВНИМАНИЕ!** Бумажная корзина для унитаза должна быть несоприкасающийся к воде при его использовании!

**Предостережение:** хранить в недоступном для детей месте.

**Условия хранения:** при комнатной температуре.