



ІНСТРУКЦІЯ по застосуванню морської солі та системи для промивання носа

Форма випуску: Один пакетик-саше містить 2,97 г натуральної солі Адриатичного моря, з більш ніж 80 мінералами, збагаченої ефірними маслами мирта та безсмертника. По 30 пакетиків-саше в комплекті з ємністю для промивання або 30 пакетиків-саше в катронній коробці.

Назва і місцезнаходження виробника.
Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Свілно 20, 51000 Рієка, Хорватія.
Jadran-Galenski Laboratorij d. d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia.

Властивості:

Нормальне дихання залежить від стану слизової оболонки носа. Застуда, алергічні реакції, запалення носа, перебування в кімнаті з кондиціонованим повітрям, центральним опаленням та таке інше, можуть посилити носову секрецію і призвести до набрякості, або навпаки до сухості слизової оболонки носа. У подібних випадках нормально дихати неможливо. Утруднене дихання - це проблема, яка зустрічається як серед дітей, так і серед дорослих. І саме море та середземноморська рослинність, має позитивну дію на дихальну систему. Застосовуючи морську сіль, можна досягти того ж природного ефекту, який з'являється, якщо жити біля моря і промивати ніс морською водою, яка благотворно впливає на слизову оболонку носа.

Система для промивання носа Аква Маріс® дозволяє зручно і безпечно

- очистити слизові оболонки по всій довжині носових ходів,
- зменшити набряк та запалення,
- видалити надлишок слизу та полегшити дихання.

Рідина потрапляє в порожнину носа «самопливом», тобто без додаткового тиску, що запобігає ризику виникнення отиту.

Промивання носової порожнини з Аква Маріс® збагаченою морською сіллю застосовується для:

- очищення слизової оболонки носа та видалення скупчень слизу, пилу, алергенів по всій довжині носових ходів;
- профілактики та супутнього лікування гострих респіраторних інфекцій (ГРВІ, грип тощо);
- комплексного лікування гострих та хронічних захворювань носа (риніти, риносинусити, аденоїдити тощо);
- відновлення слизової оболонки після операцій на носі та параназальних синусах (після консультації з лікарем);
- як допоміжний засіб зволоження порожнини носа у випадках утруднення дихання, спричиненого централізованим опаленням, кондиціонованим повітрям і таке інше;
- для гігієни носа особливо у професійних спортсменів та любителів активного відпочинку.

Спосіб застосування:

Промивати ніс потрібно як описано нижче:



1 Розріжте пакетик-саше і висипте морську сіль в ємність для промивання.



6 Для видалення залишків розчину з носа, висякайтесь не змінюючи положення голови.



2 Заповніть ємність для промивання водою температурою близькою 37°С до мітки (рисочка що відповідає об'єму 330 мл) і перемішайте щоб розчинити морську сіль.



7 Встаньте прямо та висякайтесь в пряму положенні.



3 Нахиліть голову вперед і вбік. Притисніть підборіддя до грудної клітки.



8 Повторіть процедуру з іншою ніздрею.



4 Прикладіть кінчик ємності до ніздрі таким чином, щоб він був щільно притиснутий до неї. Вдихніть через рот та затримайте дихання. Почніть промивання.



9 Після використання промийте ємність чистою водою і добре висушіть.



5 Нахиліть ємність таким чином, щоб розчин почав потрапляти з кінчика ємності в носовий хід. Розчин буде витікати з іншої ніздрі.

Особливості застосування:

Засіб Аква Маріс® морську сіль можна застосовувати під час вагітності або годування груддю.

Не застосовувати дітям віком до 5 років. Не застосовувати при підвищеній чутливості до компонентів засобу, гострому отиті та загостренні хронічного отита, частих носових кровотечках, новоутвореннях в порожнині носа, повній непрохідності носових ходів. Збагачена морська сіль не містить консервантів.

Умови зберігання. Не потребує особливих умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 3 роки.

Уповноважений представник виробника в Україні: Представництво «Ядран-Галенська Лабораторія д.д.» 01015, м.Київ, вул. Лаврська 16, Тел.+38(044)377-54-16
www.aquamaris.com.ua

Дата останнього перегляду: 30.05.2019

Інформація про інші медичні вироби з продуктової лінійки Аква Маріс®:

ПРОДУКТ	ВІК, З ЯКОГО МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОДУКТ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СКЛАД
Аква Маріс®, краплі назальні 10 мл	3 перших днів життя	Зволоження та очищення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Бебі, краплі назальні 10 мл	3 перших днів життя	Зволоження та очищення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Бебі Інтенсив, назальний спрей 50 мл, 150 мл	3 першого місяця життя	Інтенсивне промивання носа, видалення надмірної кількості слизу та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс®, назальний спрей 30 мл	3 одного року	Очищення, захист та зволоження слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Класик, назальний спрей 30 мл	3 одного року	Очищення, захист та зволоження слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс®, назальний спрей 50 або 150 мл	3 одного року	Видалення слизових виділень та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Інтенсив, назальний спрей 50 або 150 мл	3 одного року	Інтенсивне промивання носа, видалення слизових виділень та полегшення дихання	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена.
Аква Маріс® Стронг, назальний спрей 30 мл	3 одного року	Усушення набряку та закладеності носа	Гіпертонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Екстра Стронг, назальний спрей 150 мл	3 одного року	Інтенсивне промивання, усушення набряку та закладеності носа	Гіпертонічний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, вода очищена
Аква Маріс®, спрей для горла 30 мл	3 трьох років	Зменшення подразнення горла та ротової порожнини	Гіпертонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами.
Аква Маріс® Прополіс, спрей для горла та порожнини рота 150 мл	3 трьох років	Усушення подразнення слизової оболонки горла та порожнини рота	Морська вода Адриатичного моря, екстракт прополісу, гліцерин, вода очищена.
Аква Маріс® Плюс, назальний спрей 30 мл	3 одного року	Очищення, зволоження та відновлення слизової оболонки носа	Ізотонічний стерильний розчин морської води Адриатичного моря з натуральними солями та мікроелементами, декспантенол.
Аква Маріс®, морська сіль, 30 пакетів - саше	3 п'яти років	Зручне промивання порожнини носа в домашніх умовах у дітей та дорослих. Дбайливо та ніжно очищує ніс, видалює надлишок слизу.	Натуральна морська сіль без добавок.
Аква Маріс®, система для промивання носу в комплекті з морською сіллю в пакетах-саше			Ємність для промивання носа в комплекті з натуральною морською сіллю.
Аква Маріс®, збагачена морська сіль, 30 пакетів-саше			Натуральна морська сіль, збагачена ефірними маслами мирта і безсмертника.
Аква Маріс®, система для промивання носу в комплекті зі збагаченою морською сіллю			Ємність для промивання носа в комплекті з натуральною морською сіллю, збагаченою ефірними маслами мирта і безсмертника.

Пояснення символів на упаковці:

Слід ознайомитись з інструкцією по застосуванню.

Виробник Партія №

Використовувати до:

UA 130001741/07



KUTIJA UPUTA ETIKETA TUBA AQUA MARIS sustav obogaćen soli, UKR		BOJE: PANTONE 2592 PANTONE 2756	<input checked="" type="checkbox"/> 1. ispravka Date: 21.03.2019.	<input type="checkbox"/> 8. ispravka Date:
 ŠIFRA VERZIJA DATUM DIMENZIJA FARMACODE VIZUALNI KOD EAN KOD FONT PRIPREMA FALCANA / NEFALCANA	130001741 07 17.05.2019. 150 x 300 mm 64; 65 - Arial Adobe Illustrator CC FALCANA H2/2/2	<input checked="" type="checkbox"/> 2. ispravka Date: 06.06.2019. <input type="checkbox"/> 3. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 4. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 5. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 6. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 7. ispravka Date:	<input type="checkbox"/> 9. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 10. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 11. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 12. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 13. ispravka Date: <input type="checkbox"/> 14. ispravka Date:	
				Ne printa se Štampa Bez laka Brail Mjesto za otisak (podataka u proizvodnji)