

CITO TEST® Syphilis

Застосування: CITO TEST® Syphilis – експрес-тест для якісного визначення суммарних антитіл до блідої спірохети.

Загальна інформація: Сифіліс – венерична хвороба, що спричиняється блідою трепонемою (*Treponema pallidum* (TP)). Якщо захворювання не лікувати, воно набуває хронічного перебігу і може протікати багато років з поступовим розвитком важких уражень внутрішніх органів та нервової системи. Характерними для сифілісу є стадійність розвитку хвороби та довгі періоди латентного, безсимптомного перебігу.

Антитіла до TP можуть бути визначені вже на 4-7 день після виникнення шанкру. Тому, для діагностики сифілісу використовують тести, що базуються на виявленні антитіл до TP.

Переваги теста:

- **швидко:** результат через 10 хв.
- **анонімно**
- **точно – чутливість та специфічність більше 99,9%²**

Комплектація:

- тест-касета
- піпетка
- буфер
- інструкція

Процедура тестування:

1. Відкрити запаяний пакет, дістати тест-касету та негайно використати.
2. Перевірити наявність маркування Syphilis на тест-касеті.
3. Забір капілярної крові з пальця: помити руки водою з милом чи протерти змоченою у спирті ваткою, висушити; рухами від зап'ястя до кінчиків пальців розім'яти середній або безіменний палець, не торкаючись місця проколу; проколоти шкіру стерильним одноразовим ланцетом, витерти першу краплю крові; м'яко масажуючи палець, досягти утворення достатньої краплі крові; відібрати одноразовою піпеткою 80 мкл крові, уникаючи утворення бульбашок повітря.
4. Внести весь об'єм крові (2 краплі) в лунку S на тест-касеті, потім додати 1 краплю буферу та почати відлік часу.
5. Інтерпретацію результату провести через 5 хв.



Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 2-30°C. Термін зберігання – 24 міс. Не замораживати!