

CITOLAB G – діагностичні тест-смужки для визначення глюкози у сечі.

Застосування: CITOLAB G - тест-смужки діагностичні для визначення глюкози у зразках сечі.

Для самоконтролю!

Загальна інформація:

Навіщо діагностувати?

В нормі **глюкоза у сечі відсутня**. На появу глюкози у сечі впливає концентрація її у крові. Концентрація глюкози у крові, при перевищенні рівня котрої глюкоза з'являється у сечі, називається **нирковим порогом**. Він дорівнює для глюкози 8,8–9,9 ммоль/л. При концентрації глюкози у крові більш ніж 8,8-9,9 ммоль/л, що перевищує нирковий поріг чи при порушенні функції нирок, глюкоза з'являється у сечі.

Кого тестувати?

- При підозрі на цукровий діабет
- Коли необхідно оцінити перебіг цукрового діабета та ефективність його лікування
- При підозрі на порушення функції нирок
- При підозрі на ендокринні порушення в організмі (гіпертиреоз, синдром і хвороба Іценко–Кушинга, феохромоцитому, акромегалію)
- При веденні вагітності, особливо на пізніх термінах
- Для самоконтролю при цукровому діабеті (ранкова порція сечі)

Переваги використання CITOLAB G:

- ✓ **Висока чутливість теста** – 50 мг/дц глюкози!!!
- ✓ **Оптимальна кількість смужок** - завжди стане в нагоді у домашній аптечці.
- ✓ **Максимальний термін зберігання** - ще протягом 6 місяців після відкриття упаковки можна використовувати.
- ✓ **Швидкість отримання результату** - оцінити результат можна вже через 1 хвилину.

Комплектація:

- 50 тест-смужок з вологопоглиначем у контейнері
- інструкція

Процедура тестування:

1. Занурте тестову ділянку смужки в сечу на 2 сек.

2. Проведіть ребром смужки по краю ємності, щоб видалити залишки сечі (не торкатися тестовою зоною смужки!!!)

2. Тримаючи смужку горизонтально, промокніть її адсорбуючим матеріалом для видалення залишків сечі.

3. Оцінку результату провести через 60 сек.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

нег.	± 100(5.5)	+250(14)	++500(28)	+++1000(55)	mg/dL (mmol/L) мг/дл (ммоль/л)
------	------------	----------	-----------	-------------	-----------------------------------

Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 15-30°C. Термін зберігання – 24 міс. Не заморожувати!