

Українська

FARMACTIVE® Пов'язка для лікування рубців

Передбачуване використання

FARMACTIVE® Пов'язка для лікування рубців - неінвазивний виріб для лікування гіпертрофічних рубців і келоїдів, що виникають внаслідок післяопераційних хірургічних ран, акушерської допомоги, косметичної хірургії, а також для лікування рубців, спричинених саднами, синцями, опіками, видалення татуювання і лазера.

Він може бути використаний для запобігання початку подразнення від тертя.

Інструкції щодо використання

-Перед застосуванням ретельно очистіть ділянку, що підлягає лікуванню, і переконайтеся, що вона суха;

-Зніміть захисний папір, накладіть на рубець, приклеюючи краї. При необхідності можна вирізати перед зняттям захисного паперу, пристосовуючи його до ділянки, що підлягає лікуванню;

-Залишати на місці не менше ніж на 12 годин в день;

-Між першим і другим застосуванням дайте шкірі дихати принаймні 1 годину;

-Не продовжувати лікування більше 8 тижнів;

-Виріб можна повторно використовувати: перед кожним використанням перевірте його стан. Якщо він забруднений, пошкоджений або має зміни, не використовуйте його;

-Виріб може контактувати з водою.

Термін придатності

При зберіганні у власній невідкритій коробці та відповідно до інструкцій виріб придатний протягом 5 років з дати виготовлення.

При використанні виріб повинен бути замінений кожні 15 днів, навіть якщо він є цілісним.

Попередження Зовнішнє використання. Не ковтати.

Використовуйте виріб за призначенням.

Використовуйте тільки на непошкоджених і не кровоточивих рубцях.

Не використовуйте на ділянках шкіри, оброблених кремами або маслами.

Зберігати в недоступному для дітей або людей зі зниженими когнітивними можливостями. Характеристики виробу можуть бути гарантовані лише в оригінальній нерозкритій упаковці та можуть зберігатися відповідно до наведених нижче специфікацій.

Використовуйте виріб до терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Інструкції для стерилізації

Виріб не можна стерилізувати.

Спосіб зберігання

Зберігайте виріб у оригінальній упаковці в прохолодному і сухому місці, далеко від джерел тепла або відкритого полум'я. Не піддавайте його впливу прямих сонячних променів та уникайте запиленого середовища. Рекомендована температура зберігання: від 0 °C до 50 °C. Якщо виріб не використовується, його можна розмістити на спеціальному кишеньковому дзеркалі.

Побічні ефекти

Для цього виробу не передбачено жодних побічних ефектів. Однак, у разі почервоніння, свербіння, висипу або зміни стану рубця, негайно зніміть виріб. Якщо симптоми зберігаються, зверніться за медичною допомогою.

Протипоказання

Немає відомих особливих протипоказань при використанні цього виробу; однак ми не рекомендуємо його використовувати у пацієнтів з доведеною гіперчутливістю до силікону.

Утилізація

Після використання утилізуйте виріб відповідно до діючих місцевих норм щодо інфікованих відходів.

Останній перегляд тексту: 06/2020 Ver. 02

Уповноважений представник в Україні ТОВ "БМЦ"



UA.TR.099



вул. Гріга, 3, м. Тернопіль,
Тернопільська обл.,
Україна, 46020
тел.: +380678824190
e-mail: info@bmc-ua.com



ФАРМАК-ЗАББАН СПА
Via Персичетана, 26 - 40012
Кальдерара-ді-Рено,
Болонья - Італія
www.farmacazabban.com
company@farmaczabban.com

Символи зазначені на етикетці



- одноразове застосування



- використати до : рік і місяць



- номер партії



- увага, дивися інструкції перед застосуванням

У разі будь-якої несправності або погіршення характеристик та / або властивостей виробу, у разі будь-яких побічних наслідків споживачі повинні інформувати виробника та Державну службу України з питань контролю за лікарськими засобами та наркотичними середниками, проспект Перемоги, 120-А, Київ, 03115, Україна, електронна пошта: dls@dls.gov.ua, (ДЛС України, <http://www.dls.gov.ua/>)