

## Інструкція із застосування медичних виробів

Набір мозольних пластирів для видалення загрибілої шкіри 2шт 50 mm (мм) x 70 mm (мм)  
NORDEPLAST®

Набір мозольних пластирів «СаліПад» для видалення загрибілої шкіри 2шт 40mm (мм) x 60 mm  
(мм) ECOPLAST®

**Призначення:** пластир захищає шкіру від тертя та розм'якшує загрибілі ділянки шкіри. Ефективно видаляє сухі мозолі та загрибілу шкіру.

**Спосіб застосування:** перед застосуванням зробіть теплу ванну для стопи, ретельно очистіть та висушіть уражену ділянку. Вийміть пластир з індивідуальної упаковки (якщо потрібно відріжте потрібний розмір), зніміть захисний папір та приклейте до ураженого місця. Пластир діє протягом доби. Змінійте пластир за потреби. За кілька днів застосування пластирів зніміть залишки загрибілої шкіри за допомогою абразивного матеріалу. Повторюйте процедуру доки не досягнете потрібного ефекту – повного позбавлення загрибілої шкіри.





**Застереження:** тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати на пошкодженій, подразненій шкірі. Якщо виникають неприємні відчуття, подразнення шкіри, припиніть застосування пластиря. У разі наявності хвороб крові, цукрового діабету а також при вагітності, у період годування немовляти, а також для дітей, віком до 16 років необхідно проконсультуватись з лікарем. Не вживати довше, ніж 14 днів без консультації з лікарем.


**Форма випуску медичного виробу:** основою пластирів є ткани матеріали, покриті з одного боку тонким адгезивним шаром, що містить 35 – 40% саліцилової кислоти.

**Умови та термін зберігання:** зберігати подалі від джерел світла і тепла в сухому і чистому місці, при температурі + 5 °С + 30 °С, при відносній вологості не більше 80%. Використати до: дивитися на упаковці. Не використовуйте виріб після закінчення терміну придатності. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Умовні позначення:**

Позначка	Назва
EcoPlast®	торгова марка
NordePlast®	торгова марка
UA.TR.099	знак відповідності технічним регламентам із зазначенням номеру органу з оцінки відповідності
	Символ «ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ»
	Символ «Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО»
	логотип виробника
	Символ «ВИРОБНИК»

	Ознайомтесь з інструкцією із застосування
	Символ «використати до зазначеної дати»
	Символ «КОД ПАРТІЇ»
	Символ « обмеження вологості при зберіганні»
MD	Медичний виріб

 Ліспаяс спеціалас економіскас зонас СІА "НордеПласт", Латвія, ЛВ-3405, Зіємелю ісла 19, Ліспая, Латвія (телефон: +37120037773, [nordeplast.lv@gmail.com](mailto:nordeplast.lv@gmail.com))

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «БАЛТИК МЕДІКАЛ», вулиця Богдана Хмельницького, буд 23-Б, м. Київ, 01030, Україна, тел. +38 073 268 23 82, [office@balticmedical.com.ua](mailto:office@balticmedical.com.ua)



UA.TR.099

Дата останнього перегляду: 2022 – 08 .